

TAT5000  
**Exergen**  
voorhoofd  
temperatuursensor

Geen  
disposables  
en 5 jaar  
garantie



Snel Consistent  
Accuraat Betrouwbaar

# Hoe werkt het?




## Stap 1 - Scan over het voorhoofd

Plaats de meetkop vlak op de huid tegen het midden van het voorhoofd, druk op de knop en hou deze ingedrukt. Schuif de meetkop in een rechte lijn dwars over het voorhoofd tot aan de haargrens. Blijf de knop ingedrukt houden...



## Stap 2 - Scan achter het oor

Neem de meetkop van het voorhoofd en plaats deze op de huid achter het oor, halverwege het oorbot. Schuif naar beneden tot in het zachte kuiltje achter het oorleletje.

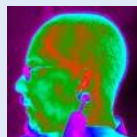

## Stap 3 - Aflezen

Laat de knop los en lees de temperatuur af.



# Een betere manier om de temperatuur van iemand te meten

De lichaamstemperatuur is één van de belangrijkste indicatoren om de gezondheid van iemand te bepalen. Een snelle, accurate thermometer is essentieel voor het vaststellen van de temperatuur.

TAT (temporal artery thermometry), temperatuurmeting bij de slaapslagader, is een nieuwe methode waarbij de temperatuur wordt bepaald via infrarode technologie die de warmte detecteert die van nature door het huidoppervlak wordt uitgestraald.



## Betere resultaten

Deze methode voor temperatuurbeoordeling geeft aantoonbaar betere resultaten en verlaagt de kosten door op een non-invasieve wijze de lichaamstemperatuur te meten met een klinische nauwkeurigheid die via geen enkele andere methode kan worden bereikt.

## Schoonmaken

Omdat de Exergen alleen in contact komt met de huid is schoonmaken zeer eenvoudig. Hetzelfde protocol als voor een stethoscoop volstaat.





## De Exergen TAT5000 is:

- ✓ simpel in gebruik
- ✓ ergonomisch gevormd en lichtgewicht
- ✓ kosteneffectief
- ✓ snel
- ✓ comfortabel voor de cliënt en de verpleegkundige
- ✓ accuraat
- ✓ betrouwbaar
- ✓ consistent
- ✓ net zo makkelijk te reinigen als een stethoscoop
- ✓ te gebruiken voor alle leeftijden
- ✓ non-invasief

‘Zeer handig  
in gebruik en  
nauwkeurig!’



Wilt u meer informatie neem dan contact op met:

**Van Vliet Medical Products**  
**E-mail: [infoproducts@vanvlietmedical.nl](mailto:infoproducts@vanvlietmedical.nl)**  
**Tel.: +31 (0)854872170**